

TS-ABF-6
Anleitung zur biologischen Leistungsprüfung
der Abfalldesinfektion

Anwendungsbereich:

Das Testsystem enthält den Bio-Indikator SIMICON DS, entsprechend der DIN 58949-4 und ist zur biologischen Validierung und Routinekontrolle von Dampfdesinfektion bei 105 °C -1 min, Wirkungsbereich ABC geeignet.

Durchführung der Prüfung:

1. Prüfmodelle aus der Verpackung entnehmen.
Die Schraubkappe des Prüfmodells nicht öffnen!
2. Ein Bio-Indikator gilt als Transport- und Wachstumskontrolle und darf nicht mit den anderen Indikatoren desinfiziert werden.
3. Die Prüfmodelle in üblicherweise verwendete, dampfdurchlässige Desinfizierbehältnisse geben. Als Füllmaterial wird Zellstoff empfohlen.
4. Prüfmodelle schichtweise im unteren Drittel des Behältnisses verteilen.
5. Einstellung von Druck/Temperatur-Zeitkombination am Desinfektionsprogramm überprüfen!
6. Vorgang starten.
7. Prüfbericht ausfüllen und die Verteilung der Prüfmodelle entsprechend der dargestellten Figuren ankreuzen oder skizzieren.
8. Nach Ablauf der Desinfektion die Prüfmodelle sofort entnehmen
9. Rücksendung der Bio-Indikatoren mit Transportkontrolle und Prüfbericht an das Hygiene-Institut.
Wichtig: Adresse und Telefon-/Faxnummer nicht vergessen!
10. Nach erfolgter mikrobiologischer Untersuchung erhalten Sie den Prüfbericht mit dem Ergebnis und einer Beurteilung vom Hygiene-Institut zurück.