

TS-DA-6-N Anleitung zur biologischen Leistungsprüfung eines Dampfsterilisationsverfahrens

Anwendungsbereich:

Das Testsystem enthält den Bio-Indikator SIMICON ST/DA, entsprechend der ISO 11138-3 und ist zur biologischen Validierung und Routinekontrolle der Dampfsterilisation im Klein-Sterilisator der Klasse N geeignet.

Durchführung der Prüfung:

1. Die Karte mit den Bio-Indikatoren aus dem Versandumschlag nehmen. Einzelpäckchen nicht öffnen!
2. Der Bio-Indikator im PE-Beutel gilt als Transport- und Wachstumskontrolle und darf deshalb nicht mit den anderen Indikatoren sterilisiert werden.
3. Die Karte mit den Bio-Indikatoren in den Sterilisator legen.
4. Sterilisiervorgang starten.
5. Prüfbericht ausfüllen.

Wichtig: Angaben über den Sterilisator, Sterilisiertemperatur, Druck, Zeit sowie Chargen-Nummer der Prüfung unbedingt dokumentieren!

6. Nach Ablauf des Sterilisationsprozesses die getesteten Bio-Indikatoren entnehmen und mit dem Prüfbericht an das Hygiene-Institut einsenden.

Wichtig: Adresse und Telefon-/Faxnummer nicht vergessen!

7. Nach erfolgter mikrobiologischer Untersuchung erhalten Sie den Prüfbericht mit dem Ergebnis und einer Beurteilung vom Hygiene-Institut zurück.