

TS-DA-6-S / TS-DA-6-B Anleitung zur biologischen Leistungsprüfung eines Dampfsterilisationsverfahrens

Anwendungsbereich:

Das Testsystem enthält den Bio-Indikator SIMICON ST/DA, entsprechend der ISO 11138-3 und ist zur biologischen Validierung und Routinekontrolle der Dampfsterilisation im Klein-Sterilisator der Klasse S bzw. B geeignet.

Für Schnellprogramme empfiehlt SIMICON speziell angepasste Testsysteme/Prüfkörper.

Durchführung der Prüfung:

1. Das Testsystem (Kunststoffbox) aus dem Versandkarton nehmen und ungeöffnet in die Sterilisationskammer legen. Die Kunststoffbox ist für die Dampfsterilisation (max. 150 °C) geeignet und enthält das biologische Testmaterial.
2. Die Transport- und Wachstumskontrolle darf nicht sterilisiert werden!
3. Das zu prüfende Programm auswählen.
4. Sterilisiervorgang starten.
5. Nach Ablauf des Sterilisiervorgangs Testsystem entnehmen und ungeöffnet in die Versandpackung zurücklegen.
Wichtig: Angaben über den Sterilisator, Sterilisiertemperatur, Druck, Zeit sowie Chargen-Nummer der Prüfung unbedingt dokumentieren!
6. Prüfbericht ausfüllen.
7. Testset mit Prüfbericht an SIMICON zurücksenden.
Wichtig: Adresse und Telefon-/Faxnummer nicht vergessen!
8. Nach erfolgter mikrobiologischer Untersuchung erhalten Sie den Prüfbericht mit dem Ergebnis und einer Beurteilung vom Hygiene-Institut zurück.