

# Testsystem SIMICON EN-DUO

für Endoskopaufbereitungsautomaten vom Typ Einkammer- und Zweikammermaschine

## Anwendungsbereich:

Das Testsystem SIMICON EN-DUO dient zur mikrobiologischen Validierung und Routinekontrolle von Reinigungs- und Desinfektionsverfahren für flexible Endoskope. Das Testsystem besteht aus zwei Arten von Prüfkörpern, die mit Testansammlungen gemäß ISO 15883 und mit *E. faecium* KBE  $\geq 10^9$  pro Keimträger kontaminiert sind.

## Durchführung der Prüfung:

Die Prüfung erfolgt in 5 Schritten. Die für jeden Schritt benötigten Prüfmittel sind mit den Nummern 1 bis 5 gekennzeichnet.

Das Testsystem beinhaltet separat verpackte Prüfmittel für die Überprüfung der Spülkammern.

Einmalhandschuhe anziehen

**1**

### Endoskop-Prüfmodelle einsetzen

Prüfmodelle aus den Verpackungen entnehmen und an zwei repräsentative Spülkanäle anbringen.

**ACHTUNG:** Die Prüfmodelle enthalten bereits die Bio-Indikatoren SIMICON EF. **Bitte nicht öffnen!**

Die Prüfmodelle zusammengerollt lassen, Kabelbinder und Anschlussschläuche nicht entfernen.

**2**

### Bio-Indikator SIMICON EN zur Überprüfung des Außenraums (Spülkammer)

Den Bio-Indikator SIMICON EN aus der Verpackung entnehmen und mit dem mitgelieferten Kabelbinder an einer repräsentativen Stelle der Spülkammer anbringen.

**Hinweis:** Gleiche Vorgehensweise bei Schritt 1 und 2 für beide Kammern.

Einmalhandschuhe ausziehen

**3**

### Transport- und Wachstumskontrolle

**ACHTUNG:** Diese Bio-Indikatoren verbleiben in der Verpackung und dürfen nicht mit aufbereitet werden!

Desinfektionsprogramm auswählen und starten

**4**

### Prüfbericht

Prüfbericht sorgfältig und vollständig ausfüllen.

**5**

### Entnahme der Prüfmodelle und Versand

**ACHTUNG:** Bei den nachfolgenden Schritten **aseptisch** arbeiten.

Die Prüfmodelle entnehmen und **ungeöffnet** in die im Vorfeld mit Kammer und Nummer gekennzeichnete Rücksendeverpackung geben.

Den Bio-Indikator SIMICON EN vom Kabelbinder trennen und in das im Vorfeld mit Kammer gekennzeichnete Rücksenderöhrchen geben.

Bio-Indikatoren SIMICON EN nur am äußeren Ende bis zur Bohrung anfassen. Nach Entnahme jedes einzelnen Bio-Indikators die Hände desinfizieren!

Das Testsystem im Rücksendeumschlag an das Hygiene-Institut senden.

Bitte achten Sie vor der Rücksendung auf Vollständigkeit des Testsystems.

Nach erfolgter mikrobiologischer Untersuchung erhalten Sie das Original des Prüfberichts mit den Ergebnissen von SIMICON zurück