

# Testsystem SIMICON EN-DUO-PROT

## für Endoskopaufbereitungsautomaten vom Typ GETINGE

### Anwendungsbereich:

Testsystem SIMICON EN-DUO-PROT zur Prüfung der Proteinentfernung in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten.

Das Testsystem SIMICON EN-DUO-PROT besteht aus Endoskop-Prüfmodellen zur Simulation der Endoskopkanäle und Prüfmodellen zur Prüfung der Endoskopaußenreinigung, bestückt mit SIMICON RI Indikatoren.

Der Indikator SIMICON RI im SIMICON PCD ist bzgl. der Resistenz vergleichbar mit dem Prüfkörper nach DGKH Leitlinie, sowie konform zur DIN ISO/TS 15883-5.

### Durchführung der Prüfung:

#### 1 Endoskop-Prüfmodelle einsetzen

Die Endoskop-Prüfmodelle aus der Aluverpackungen entnehmen und an die zugehörigen Spülausgänge anschließen.

**ACHTUNG:** Die Prüfmodelle enthalten bereits die Indikatoren SIMICON RI.  
**Bitte nicht öffnen!**

Die Endoskop-Prüfmodelle zusammengerollt lassen, Kabelbinder nicht entfernen.

#### 2 Prüfmodell zur Endoskopaußenreinigung einsetzen

Das Prüfmodell aus der Aluverpackung entnehmen und im RDGE platzieren.

**ACHTUNG:** Das Prüfmodell enthält bereits den Indikator SIMICON RI.  
**Bitte nicht öffnen!**

#### ! Reinigungs- und Desinfektionsprogramm auswählen und starten.

**WICHTIG:**  
Zum Nachweis der Restproteinmenge muss der Reinigungs- und Desinfektionsprozess nach der Reinigung abgebrochen werden.

#### 3 Prüfbericht vollständig ausfüllen.

Prüfebene und Prüfstelle (Kanäle) eindeutig kennzeichnen.  
Adresse und Fax-/Telefonnummer nicht vergessen!

#### 4 Entnahme der Prüfmodelle:

**ACHTUNG:** Nachfolgende Schritte mit **Einmalhandschuhen** ausführen!

Die Endoskop-Prüfmodelle entnehmen und ungeöffnet in die jeweilige gekennzeichnete Rücksendeverpackung geben (selbstklebend).

Das Prüfmodell zur Endoskopaußenreinigung entnehmen und in die Rücksendeverpackung geben (selbstklebend).

Das Testsystem an das Hygiene-Institut senden.

Bitte achten Sie vor der Rücksendung auf die Vollständigkeit des Testsystems.

Nach erfolgter Restproteinanalyse erhalten Sie das Original des Prüfberichts mit Ergebnis und Beurteilung vom Hygiene-Institut zurück.

