

TS-OPS-11

Anleitung zur biologischen Leistungsprüfung von Dekontaminationswaschverfahren für OP-Schuhe > 60 °C

Anwendungsbereich:

Das Testsystem enthält den Bio-Indikator SIMICON OPS, entsprechend der ISO 15883-7 und ist zur biologischen Validierung und Routinekontrolle von Dekontaminationswaschverfahren für OP-Schuhe > 60 °C geeignet.

Durchführung der Prüfung:

1. Bio-Indikatoren (Stahlkeimträger) aus der Verpackung nehmen und mit Kabelbindern durch die Öffnungen an der OP-Schuhspitze führen und den Bio-Indikator fixieren. Wenn die OP-Schuhe keine Befestigung des Bio-Indikators erlauben, können die Bio-Indikatoren alternativ auch an den Gitterstäben des Aufnahmekorbes befestigt werden. Die kontaminierte Seite des Bio-Indikators soll dabei immer zum rotierenden Spülarms ausgerichtet sein.
Den Korb praxisnah vollständig mit OP-Schuhen beladen.
Nach dem Befestigen der Bio-Indikatoren Hände desinfizieren!
2. Ein Bio-Indikator gilt als Transport- und Wachstumskontrolle. Dieser bleibt in der Verpackung und darf nicht dekontaminiert werden.
3. Waschgut in die Anlage einfahren. Trocknungsprogramm wenn möglich abschalten, da Heißlufttrocknung das Ergebnis verfälschen kann.
Eingestelltes Programm überprüfen und starten.
4. Prüfbericht vollständig ausfüllen und Lage der Bio-Indikatoren gegebenenfalls skizzieren oder nummerieren.
5. Mitgelieferte Tyvek-Tüten entsprechend der Lage der Bio-Indikatoren beschriften oder nummerieren.
6. Nach Ablauf des Programms jeden Bio-Indikator aseptisch entnehmen. Falls keine sterile Pinzette zur Hand, sterile Handschuhe verwenden.
Kabelbinder mit Schere auftrennen, dabei Bio-Indikatoren nur an den äußeren Enden bis zur Bohrung anfassen.
7. Bio-Indikatoren einzeln in entsprechend gekennzeichnete Tyvek-Tüten verpacken.
Wichtig: Nach Entnahme jedes einzelnen Bio-Indikators Hände desinfizieren bzw. Pinzette abflammen.
8. Tyvek-Tüten am offenen Ende umfalten und gut verschließen (z.B. Klebeband)
9. Rücksendung der Bio-Indikatoren, Transportkontrolle und Prüfbericht an das Hygiene-Institut.
Wichtig: Adresse und Telefon-/Faxnummer nicht vergessen!
10. Nach erfolgter mikrobiologischer Untersuchung erhalten Sie den Prüfbericht mit Ergebnis und Beurteilung vom Hygiene-Institut zurück.