

TS-TEX-10

Anleitung zur biologischen Leistungsprüfung von Waschverfahren für Textilien

Anwendungsbereich:

Das Testsystem enthält den Bio-Indikator SIMICON TEX, entsprechend der ISO 15883 und ist zur biologischen Validierung und Routinekontrolle von Textilwaschverfahren geeignet.

Durchführung der Prüfung:

1. Bio-Indikatoren (Streifen in Vlies-Folien-Verpackung) ungeöffnet gemeinsam mit einem üblichen Wäscheposten mit waschen. Zur leichteren Auffindbarkeit wird empfohlen, verschiedenfarbige Wäschenetze oder speziell gekennzeichnete Kopfkissenbezüge zu verwenden.
2. Ein Bio-Indikator gilt als Transport- und Wachstumskontrolle. Dieser darf nicht mitgewaschen werden.
3. Eingestelltes Programm überprüfen.
4. Programm starten.
5. Prüfbericht genau ausfüllen.
Wichtig: Temperatur und verwendete Mittel angeben.
6. Nach Ablauf des Waschprogramms Bio-Indikatoren aus dem Wäscheposten entnehmen und in die mitgelieferten PE-Beutel verpacken.
Aseptisch arbeiten, Hände vor der Entnahme der Bio-Indikatoren desinfizieren!
7. Rücksendung der Bio-Indikatoren mit Transportkontrolle und Prüfbericht an das Hygiene-Institut.
Wichtig: Adresse und Telefon-/Faxnummer nicht vergessen!
8. Nach erfolgter mikrobiologischer Untersuchung erhalten Sie den Prüfbericht mit dem Ergebnis und einer Beurteilung vom Hygiene-Institut zurück.